



NHTGlobal



居家检测

NHT 健康指标检测盒

发现您的健康蓝图




使用 NHT Global 的健康指标检测盒彻底改变您的个人健康。这项突破性的血液测试让您足不出户就能了解您当前的健康状况，为您节省了繁琐且昂贵的实验室就诊时间和麻烦。只需简单刺破手指，它就能追踪您健康多个关键领域的 **17** 种以上基本生物标志物，从而全面反映您的整体健康和生活方式。

NHT 健康指标检测盒不仅提供原始数据。它利用 SiPhox Health 的专有技术，为您的心血管、激素、炎症、代谢和营养健康提供个性化见解。我们易于理解的报告让您无需猜测结果，并可以轻松确定哪些特定健康领域需要更多关注。您的健康报告还包括专为您定制的生活方式建议，以帮助您采取主动的后续措施来改善您的生物标志物。

NHT 健康指标检测盒为您提供所需的见解，让您更加自信、清晰地掌控个人健康。了解它如何让您掌控健康之旅并帮助您充分发挥潜力。

工作原理

使用NHT 健康指标检测盒，只需四个简单步骤即可掌控您的健康：

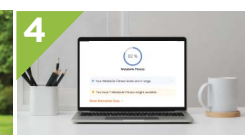			
注册您的试剂盒 扫描说明书中的二维码或访问 siphoxhealth.com/ 注册并激活您的测试试剂盒	采集样本 按照测试套件中的说明采集血液样本。 *注意：测试必须在醒来后2小时内空腹状态下进行。	邮寄至实验室 使用预付回邮信封将样品邮寄至实验室。	收到您的结果。 实验室收到您的样本后3-5个工作日内，您将收到安全的 SiPhox控制面板呈现您的测试结果及个人健康分析报告。

*SiPhox Health控制面板中显示的参考范围和见解旨在提高可读性并提供背景信息，但是，您应该咨询医生以获得更正式的结果解释。SiPhox Health 或 NHT Global 的任何信息都不应被视为医疗建议。SiPhox Health 是一种纯健康服务，并非用于诊断或治疗任何疾病。如果您对仪表板中的任何数据感到担忧，请立即咨询您的医生。

测量的生物标志物

NHT健康指标检测盒提供了对 17 多种生物标志物的洞察涵盖了您健康的多个重要领域，让您全面了解您的整体健康状况：



主要特点

综合分析

- 将 **17** 多种健康生物标志物装入一个套件中
- 对您的心血管、荷尔蒙、炎症、代谢和营养健康的可行洞察
- 个性化工具和建议，以改善您的健康和生活方式

方便

- 在家 10 分钟内即可收集样本，无需前往实验室
- 实验室收到样本后 3-5 个工作日内即可获得易于理解的结果
- 兼容 Apple Watch、Oura、Fitbit 等可穿戴设备
- 符合 FSA 和 HSA 标准

临床准确

- 在 CLIA/CAP 认证实验室完成测试分析
- 对每个检测进行广泛验证以满足联邦 CLIA 要求
- 临床准确结果不打折扣

*SiPhox Health控制面板中显示的参考范围和见解旨在提高可读性并提供背景信息，但是，您应该咨询医生以获得更正式的结果解释。SiPhox Health 或 NHT Global 的任何信息都不应被视为医疗建议。SiPhox Health 是一种纯健康服务，并非用于诊断或治疗任何疾病。如果您对仪表板中的任何数据感到担忧，请立即咨询您的医生。

兼容 300 多种可穿戴设备


想要进一步增强您的健康报告?将您最喜欢的可穿戴设备连接到 SiPhox 检测版上!跟踪您的可穿戴数据(例如您的活动水平、睡眠质量和心脏效率)可以帮助您随着时间的推移更深入地了解您的生物标志物,并让您朝着实现健康目标的方向前进。NHT健康指标检测盒 兼容 300 多种可穿戴设备 - 包括 Apple Watch、Oura、Fitbit、EightSleep、Whoop、Freestyle Libre 等。

使用说明

开始之前,请阅读测试套件中提供的完整详细说明。此测试必须在醒来后的前 2 小时内禁食进行。

如何收集您的样本:

- 1. 在样本收集卡上填写您的姓名、收集日期和出生日期。
- 2. 用温水冲洗并擦干双手,并以圆周运动摆动手臂以刺激血液流动。
- 3. 用酒精棉签清洁手指。我们建议选择非惯用手的中指或无名指。
- 4. 拧开采血针盖,用力将采血针按在指尖侧面和中部之间,刺破皮肤。(注意:如果您使用的是黄色采血针,请按下面按钮以激活。)
- 5. 轻轻按摩手指,轻轻挤压穿刺部位周围,以产生一大滴血。
- 6. 将血液滴到采集卡上的 2 个小方块上,直到血液达到第一条黑线。继续滴血,直到卡片上的两个方块都填满。
- 7. 用无菌纱布擦拭手指并包扎。
- 8. 让样本收集卡干燥至少 1 小时。

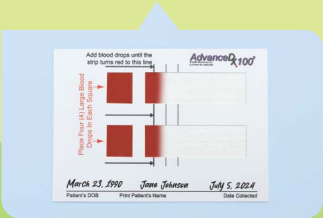

注意事项:

- 测试前,请勿食用水以外的任何食物或饮料。
- 请勿触摸、摩擦、涂抹或擦拭采集卡。
- 不要将血液滴到卡片的矩形部分上。
- 请勿重复使用采血针,因为它们仅供一次性使用。如有需要,我们会提供额外的采血针。

MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR



609 Deep Valley Drive, Suite 395
Rolling Hills Estates, CA 90274
(310) 541-0888 www.nhtglobal.com
© 2003-2024 All Rights Reserved.

US-CN-AUG/24-Bio-Essence-FF